

Инструктаж по технике безопасности

1. Перед началом работы медицинская сестра обязана проверить исправность всех физиотерапевтических аппаратов и заземляющих проводов. При обнаружении дефектов она должна сообщить об этом врачу и сделать запись о выявленных неисправностях в контрольно-техническом журнале. До устранения дефектов проводить процедуры на неисправном аппарате запрещается.
2. Запрещается использовать в качестве заземления батареи отопительной системы, водопроводные и канализационные трубы. Они должны быть закрыты деревянными кожухами.
3. Перед включением аппарата проверяют установку всех переключателей в исходное положение.
4. Категорически запрещается устранять неисправности, менять предохранители и протирать панели аппаратов, включенных в сеть.
5. При проведении ультрафиолетовых и лазерных облучений необходимо защищать глаза больных и медицинского персонала очками с темной окраской стекол и боковой защитной оправой. Нельзя смотреть навстречу первичному и отраженному лазерному лучу.
6. Запрещается проводить УВЧ-терапию при суммарном зазоре между тканями и конденсаторными пластинами свыше 6 см.
7. Запрещается проводить ингаляции в электро- и светолечебных кабинетах.
8. Во время проведения процедур медицинская сестра не имеет права отлучаться из физиотерапевтического кабинета.
9. По окончании рабочего дня все рубильники, выключатели аппаратов, а также вилки штепсельных розеток должны быть отключены от сети.
10. Ремонт физиотерапевтической аппаратуры случайными лицами категорически запрещен.

Место печати МО

Подпись общего
руководителя _____

Подпись непосредственного
руководителя _____

Подпись студента _____

